



Paramétrage de la passerelle LUSI :

Tutoriel disponible en vidéo sur [Youtube](#)

Etape 1 : La passerelle et le logiciel de gestion doivent être lancés.

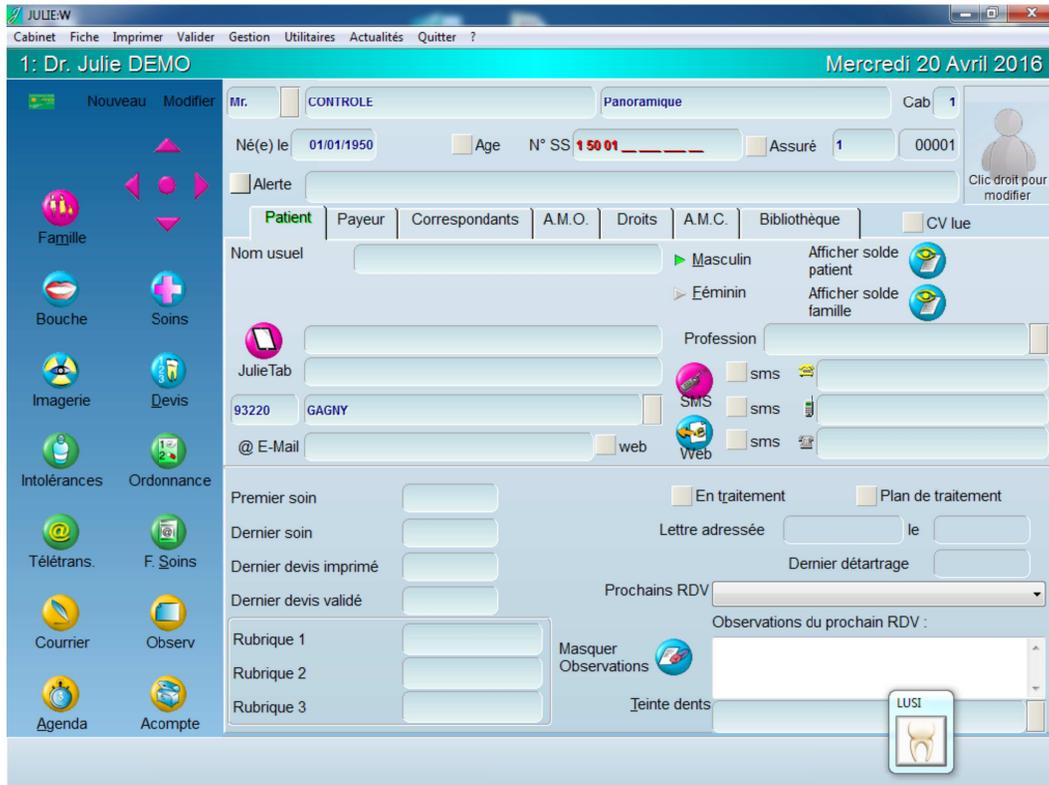


Etape 2 : Sur le symbole de la passerelle LUSI  faites un clic de gauche de la souris tout en maintenant la touche CTRL enfoncée pour faire apparaître la fenêtre de paramétrage :

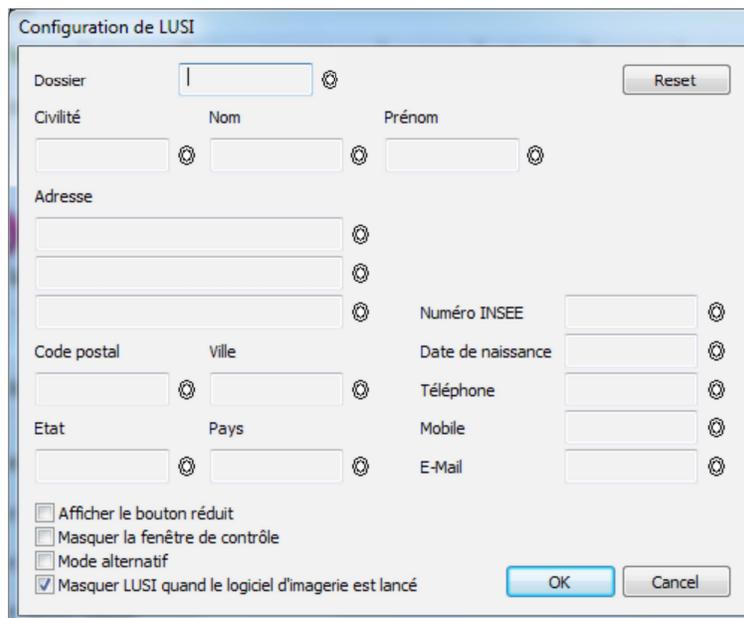


Etape 3 :

Cliquer sur les cibles  puis déplacer la souris jusqu'à l'information recherchée.

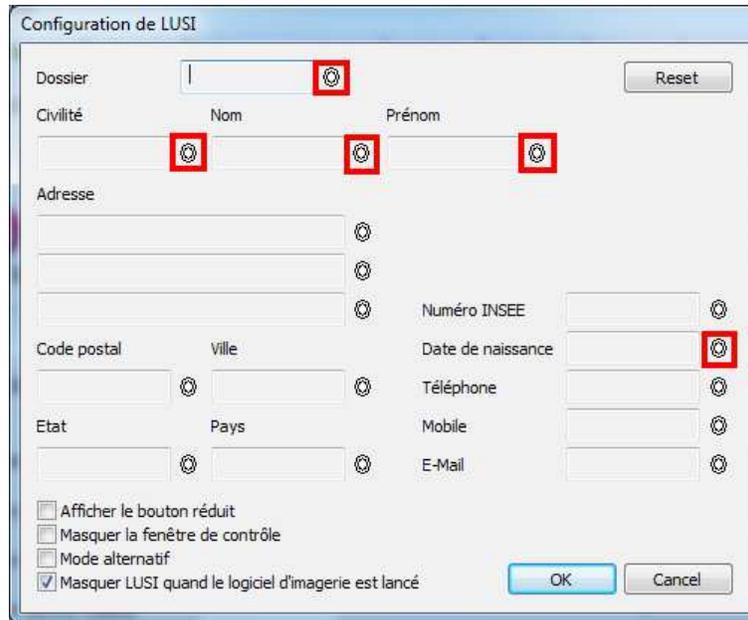

Un cadre apparaît autour de l'information ciblée :

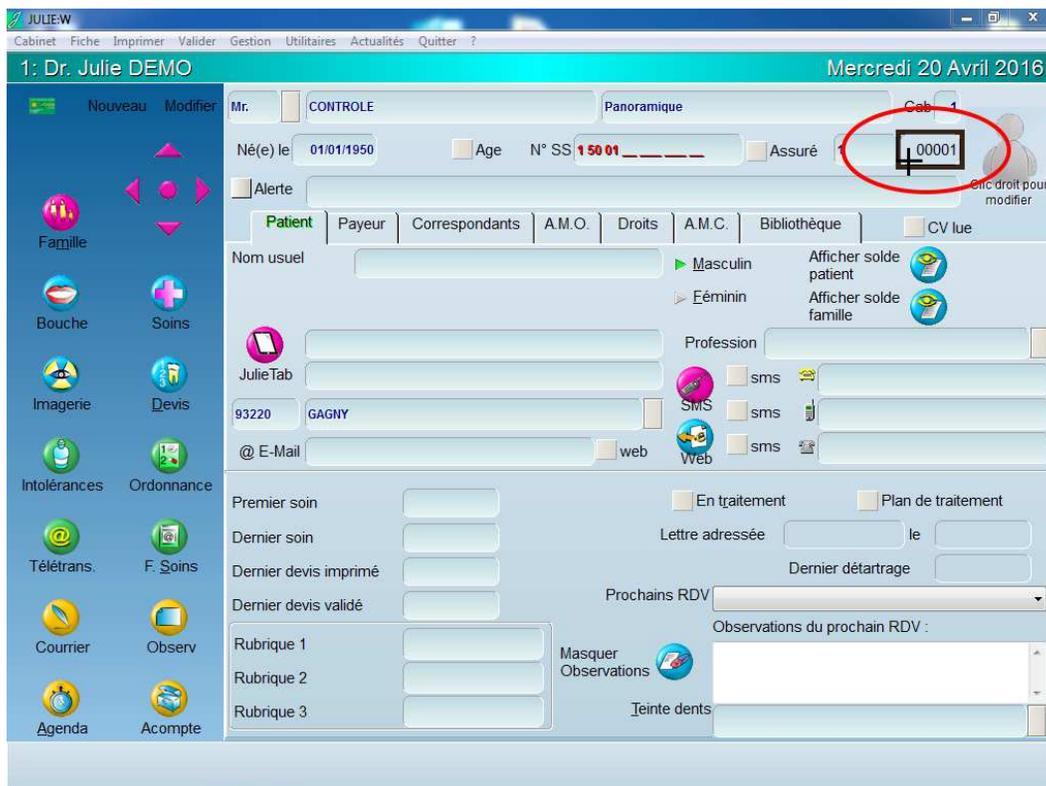

Effectuer la même opération pour chaque champ recherché, afin d'obtenir toutes les informations :
Attention au numéro de dossier (voir la note à la fin du document)

Configuration de LUSI

Dossier: 00001

Reset

Civilité: Mr. Nom: CONTROLE Prénom: Panoramique

Adresse:

Code postal: Ville: Numéro INSEE: Date de naissance: 01/01/1950

Téléphone: Mobile: E-Mail:

Afficher le bouton réduit
 Masquer la fenêtre de contrôle
 Mode alternatif
 Masquer LUSI quand le logiciel d'imagerie est lancé

OK Cancel

Etape 4 :

Cliquer sur le symbole de la passerelle LUSI  puis vérifier que les informations correspondent bien à la fiche patient :

Contrôle LUSI

Dossier: 00001

Civilité: Mr. Nom: CONTROLE Prénom: Panoramique

Adresse:


Code postal: Ville: Numéro INSEE: Date de naissance: 01/01/1950

Téléphone: Mobile: E-Mail:

OK Cancel

Etape 5 :

Les informations du patient apparaissent bien en haut de la fenêtre d'imagerie, et les éventuelles radios existantes apparaissent bien dans l'historique. Dans le cas présent et avec Sopro-Imaging, la fiche N°1 ne sera pas modifiée et correspondra à « DEMO Patient »,

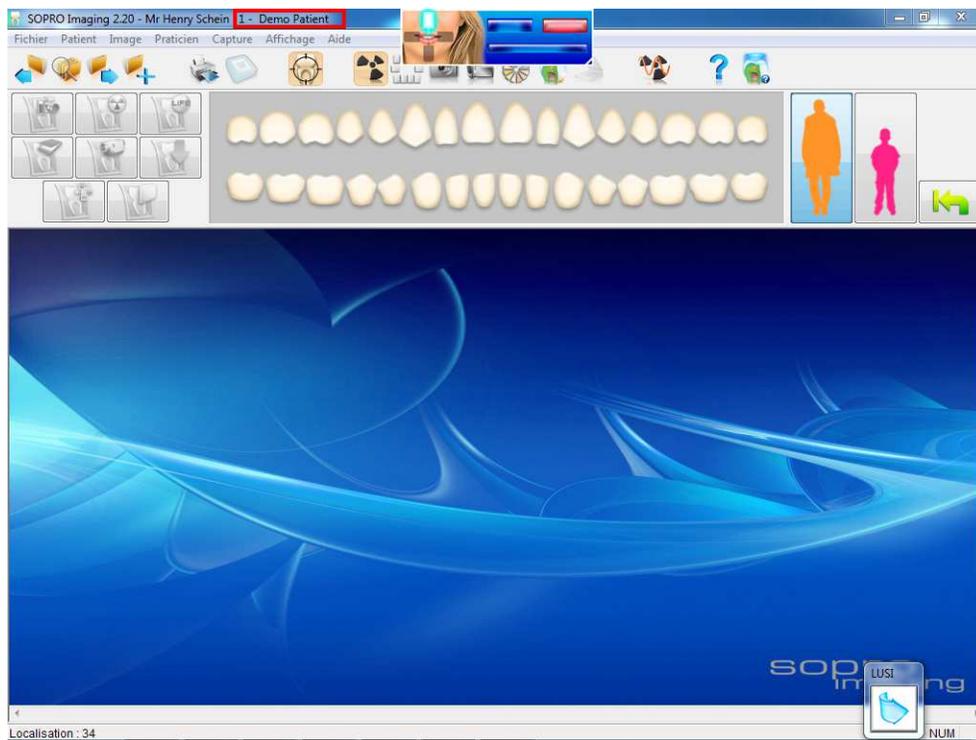

Attention :

S'il s'agit d'un reparamétrage de la passerelle, pensez à vérifier plusieurs fiches patients afin d'être sur et certain que les informations capturées sur le logiciel de gestion sont bien paramétrées. Notamment, le numéro de dossier, car sur certains logiciels de gestion (dont Julie), il existe deux numéros utilisables.

Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.